

ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

ไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน การ์ด


(ค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร)

(ใบรับแจ้งรายการละเอียดเลขที่ จฉ.2/2560)


คุณลักษณะของชุดทดสอบ

- เป็นชุดทดสอบหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมนุษย์ ด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการ Competitive Binding Immunoassay
- สามารถตรวจพบเมทแอมเฟตามีนได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
- สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายในเวลาเพียง 5 นาที
- ชุดทดสอบไม่พบปฏิกิริยาข้ามกลุ่มกับ Acetaminophen, Aspirin, Brompheniramine, Caffeine, Chlorpheniramine, Dextromethorphan, Vitamin C และ Furosemide ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ Ranitidine ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
- ภายใน 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้ 40 การทดสอบ


วิธีการทดสอบ

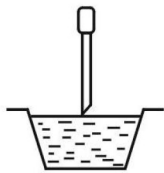


ตัวอย่างปัสสาวะ

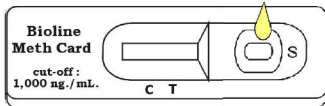

หยดปัสสาวะจำนวน 4 หยด ลงในหลุม "S"

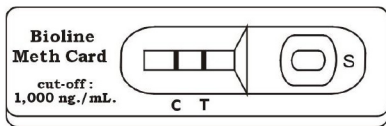


รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

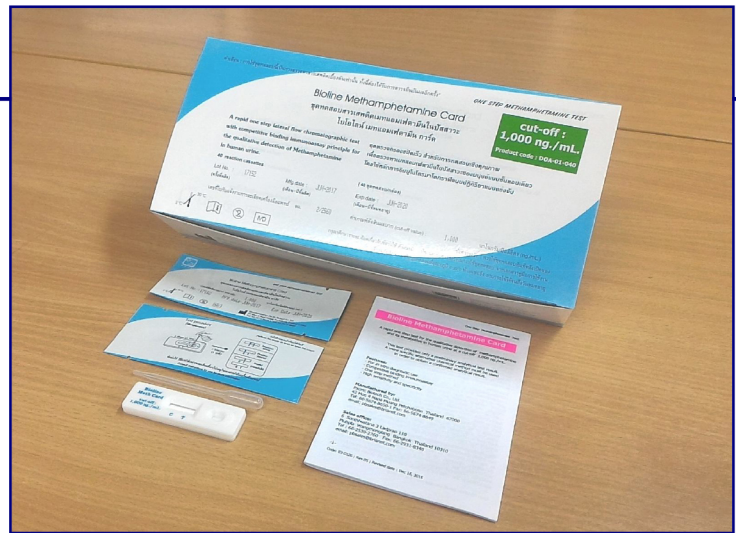


การแปลผลการทดสอบ

ผลบวก :

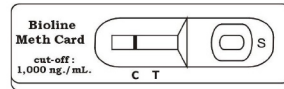



เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลบวกหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

ผลลบ :

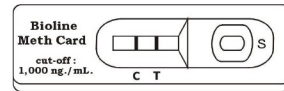

เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลลบหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนน้อยกว่า 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือไม่มีเลย

แปลผลไม่ได้ :

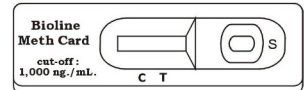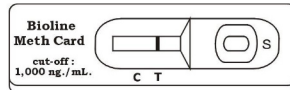

ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้น ควรทำการทดสอบด้วยชุดทดสอบใหม่

ผลิตโดย :

บริษัท แปซิฟิก ไบโอเทค จำกัด

42 หมู่ที่ 4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

จำหน่ายโดย :

บจก.ศุภโชค เคมีคอล ซัพพลาย

เลขที่ 909 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

4000 โทร.043-001-141, 081-183-7766 ,086-311-2730

http://www.supachok.co.th อีเมล info@supachok.co.th

หมายเหตุ: ระดับความเข้มข้นบริเวณแถบตรวจ (T) อาจมีการแปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบตรวจ (T) แม้ว่าแถบสีจะซีดจางก็สามารถอ่านเป็นผลลบได้