


Bioline Methamphetamine Strip (ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ จม.3/2560)

ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

คุณลักษณะของชุดทดสอบ

- เป็นชุดทดสอบหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมนุษย์ ด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการ Competitive Binding Immunoassay
- สามารถตรวจพบเมทแอมเฟตามีน ได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
- สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายในเวลาเพียง 5-7 นาที
- ชุดทดสอบไม่พบปฏิกิริยาข้ามกลุ่มกับ Acetaminophen, Aspirin, Brompheniramine, Caffeine, Chlorpheniramine, Dextromethorphan, Vitamin C และ Furosemide ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ Ranitidine ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

วิธีการทดสอบ

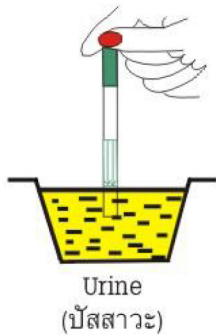

จับปลายด้านหนึ่งของชุดทดสอบ จุ่มแถบทดสอบ ด้านที่มีสัญลักษณ์ลูกศรลงในปัสสาวะในแนวตั้งฉาก โดยจุ่มไม่เกินขีดบอกระดับที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ รอจนปัสสาวะซึมผ่านขีดบอกระดับ



วางแผ่นทดสอบบริเวณพื้นที่สะอาด, อยู่ในแนวระนาบ และเริ่มจับเวลาในการอ่านผล 5-7 นาที


ผลิตโดย :

บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
42 หมู่ที่ 4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

จำหน่ายโดย :

บจก.ศุภโชค เคมีคอล ซัพพลาย
เลขที่ 909 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4000 โทร.043-001-141, 081-183-7766, 086-311-2730
<http://www.supachok.co.th> อีเมล info@supachok.co.th

การแปลผลการทดสอบ

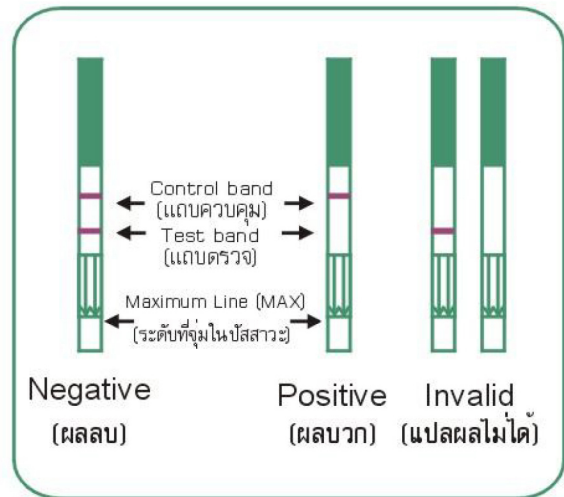

| | |
|-------------|--|
| ผลลบ | เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลลบหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนน้อยกว่า 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือไม่เลย |
| ผลบวก | เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลบวกหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร |
| แปลผลไม่ได้ | ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้น ควรทำการทดสอบด้วยแถบทดสอบใหม่ |

หมายเหตุ: ระดับความเข้มข้นบริเวณแถบตรวจอาจมีการแปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบตรวจ แม้ว่าแถบสีจะซีดจางก็สามารถอ่านเป็นผลลบได้

