

Bioline THC Strip

(ไบโอไลน์ ทีเอชซี สตรีป)




คุณลักษณะของชุดทดสอบ


- “ เป็นชุดตรวจหาสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ ด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการการเกิดปฏิกิริยาการแย่งจับ (Competitive Binding Immunoassay) ”
- “ สามารถตรวจพบกัญชาและเมตาบอไลต์ได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป ”
- “ สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า ภายในเวลาเพียง 5 นาที ”
- * ภายใน 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้จำนวน 100 ตัวอย่าง *

วิธีการทดสอบ

1. จุ่มแถบทดสอบลงในปัสสาวะนาน 30-60 วินาที โดยให้ด้านที่มีแถบลูกศรชี้ลง จุ่มไม่เกินระดับที่กำหนด
2. นำแถบทดสอบขึ้นมาวางแนวราบหรือวางพาดบนภาชนะที่ใส่ปัสสาวะ
3. รออ่านผลที่เวลา 3-5 นาที

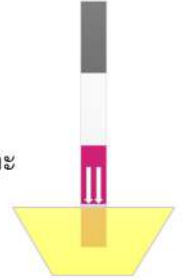

การแปลผลการทดสอบ

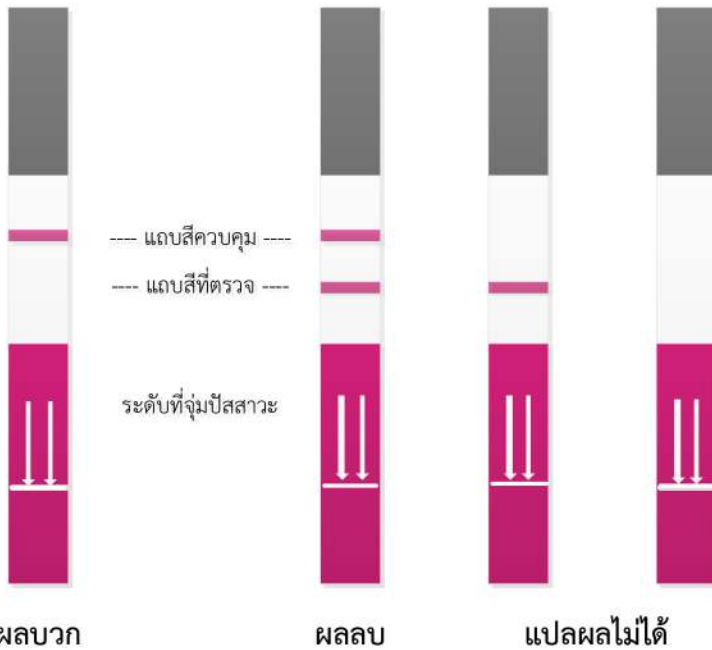

ผลบวก: ปรากฏแถบสีม่วงแดงเฉพาะแถบสีควบคุมเพียงแถบเดียวเท่านั้น แสดงว่ามีปริมาณกัญชาในปัสสาวะมากกว่า หรือเท่ากับ 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

ผลลบ: ปรากฏแถบสีม่วงแดง 2 แถบ ทั้งแถบสีควบคุมและแถบสีที่ตรวจ แสดงว่าไม่มีกัญชาอยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

แปลผลไม่ได้: เมื่อไม่ปรากฏแถบสีใดๆ หรือปรากฏเฉพาะแถบสีที่ตรวจเพียงแถบเดียวเท่านั้น อาจเกิดจากแถบทดสอบเสื่อมสภาพหรือทำการทดสอบผิดวิธี ควรทำการทดสอบซ้ำ โดยใช้แถบทดสอบอันใหม่

หมายเหตุ : ระดับความเข้มข้นบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบสีที่ตรวจ แม้ว่าแถบสีจะชัดเจนก็สามารถอ่านเป็นผลลบได้

ผลิตโดย:

บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
42 หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
E-mail: sukunya@brianet.com

จัดจำหน่ายโดย

บจก.ศุภโชค เคมีคอล ซัพพลาย
เลขที่ 909 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4000 โทร.043-001-141, 081-183-7766 ,086-311-2730
<http://www.supachok.co.th> อีเมล info@supachok.co.th