

Bioline Morphine Card

ไบโอไลน์ มอร์ฟิน การ์ด

คุณลักษณะของชุดทดสอบ


- ⇒ เป็นชุดตรวจหาสารเสพติดมอร์ฟิน ในปัสสาวะด้วยเทคนิค อิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการการเกิดปฏิกิริยา การแย่งจับ (Competitive binding immunoassay)
- ⇒ สามารถตรวจพบมอร์ฟิน และเมตาบอลไลท์ได้ตั้งแต่ที่ระดับ ความเข้มข้น 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป
- ⇒ สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายใน เวลาเพียง 5 นาที
- ⇒ ภายใน 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้จำนวน 4 ตัวอย่าง




วิธีการทดสอบ



ตัวอย่างปัสสาวะ

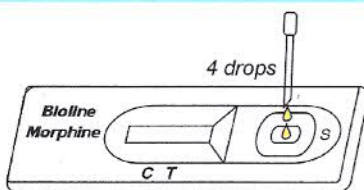


หยดปัสสาวะจำนวน 4 หยด
ลงในหลุม "S"

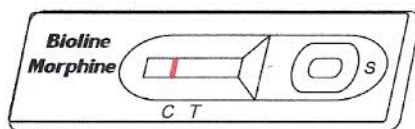


รออ่านผลที่เวลา 5 นาที



การแปลผลการทดสอบ

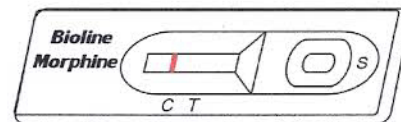

ผลบวก : เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น
หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลบวกหรือมีปริมาณ มอร์ฟิน หรือ
เมตาบอลไลท์มากกว่าหรือเท่ากับ 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

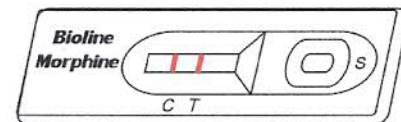

ผลลบ : เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T
หมายถึง ผลการ ตรวจเป็นผลลบหรือมีปริมาณ มอร์ฟิน หรือ
เมตาบอลไลท์น้อยกว่า 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือไม่มีเลย

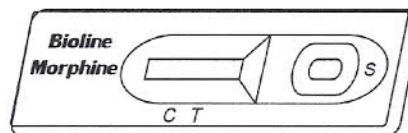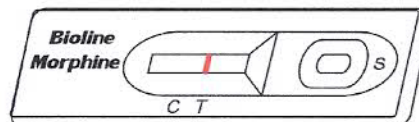

แปลผลไม่ได้ :
ไม่เกิดแถบสีม่วงแดง
ที่ตำแหน่ง C หรือ
เกิดแถบสีม่วงแดง
เฉพาะที่ตำแหน่ง T
ดังนั้น ควรทำการ
ทดสอบด้วยดัลป์
ทดสอบใหม่

หมายเหตุ : ระดับความเข้มข้นบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบสีที่ตรวจ แม้ว่าแถบสีจะชัดเจนก็สามารถอ่านเป็นผลลบได้

ผลิตโดย : บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
42 หมู่ที่ 4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

จัดจำหน่ายโดย

บจก.ศุภโชค เดห์คอลล ชัพพลาย

เลขที่ 909 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4000 โทร.043-001-141, 081-183-7766 ,086-311-2730
<http://www.supachok.co.th> อีเมล info@supachok.co.th