


Bioline Ketamine Card

ชุดทดสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะแบบขั้นตอนเดียว


คุณลักษณะของชุดทดสอบ

- เป็นชุดทดสอบหาสารเสพติดเคตามีนและเมตาบอไลต์ในปัสสาวะมนุษย์ด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการ Competitive Binding Immunoassay
- สามารถตรวจพบเคตามีน และเมตาบอไลต์ได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
- สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายในเวลาเพียง 5 นาที
- ภายใน 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้ 40 การทดสอบ


วิธีการทดสอบ

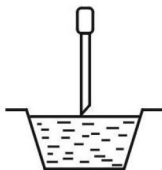


ตัวอย่างปัสสาวะ

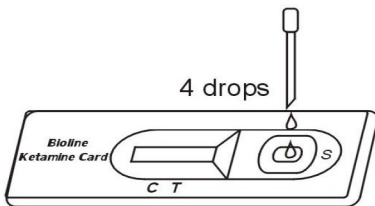

หยดปัสสาวะจำนวน 4 หยด ลงในหลุม "S"

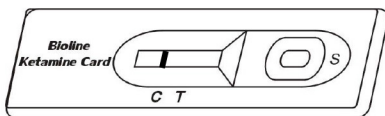


รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

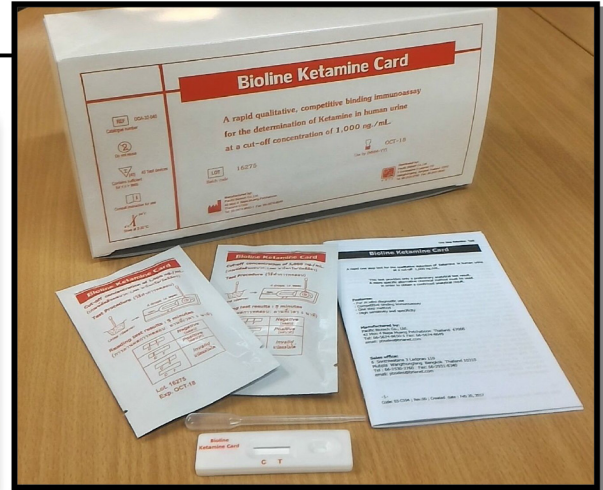


การแปลผลการทดสอบ

ผลบวก :

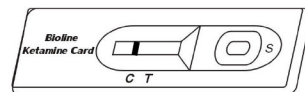



เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลบวก หรือมีปริมาณเคตามีน หรือเมตาบอไลต์มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

ผลลบ :

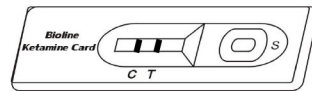

เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลลบ หรือมีปริมาณเคตามีน หรือเมตาบอไลต์น้อยกว่า 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือไม่มีเลย

แปลผลไม่ได้ :

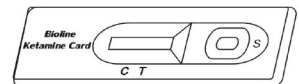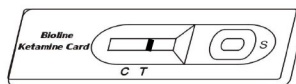

ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้น ควรทำการทดสอบด้วยชุดทดสอบใหม่

ผลิตโดย :

บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด

42 หมู่ที่ 4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

จำหน่ายโดย :

บจก.สุโขทัย เคมี่คอล จำกัด

เลขที่ 909 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

4000 โทร.043-001-141, 081-183-7766, 086-311-2730

<http://www.supachok.co.th> อีเมล info@supachok.co.th

หมายเหตุ: ระดับความเข้มข้นบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบสีที่ตรวจ แม้ว่าแถบสีจะซีดจางก็สามารถอ่านเป็นผลลบได้