

Bio-Test Methamphetamine-THC Duo Cassette



ชุดทดสอบหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน กัญชาและเมตาบอไลต์ใน
ปัสสาวะของมนุษย์แบบจุ่มขั้นตอนเดียว

คุณลักษณะของชุดทดสอบ


“เป็นชุดตรวจหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนและกัญชาในปัสสาวะ ด้วยเทคนิคอิมมูโนโนโคมาโตกราฟี
โดยอาศัยหลักการการเกิดปฏิกิริยาการแย่งจับ (Competitive Binding Immunoassay)”

“สามารถตรวจพบเมทแอมเฟตามีนได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 1000 นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไปและ
สามารถตรวจพบกัญชาได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป”


“สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า ภายในเวลาเพียง 5 นาที”

* ภายใน 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้จำนวน 25 ตัวอย่าง *

วิธีการทดสอบ

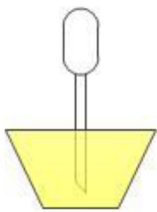

เก็บตัวอย่างปัสสาวะ

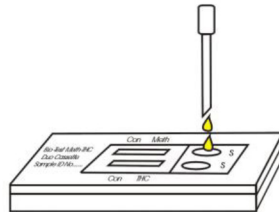

หยดตัวอย่างปัสสาวะลงในหลุม S หลุมละ 2 หยดทั้งซ้ายและขวา



รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

ภาพแสดงการอ่านผลทดสอบ

Con	Meth	เมทแอมเฟตามีน (+) & กัญชา (-)
Con	THC	เมทแอมเฟตามีน (+) & กัญชา (+)
Con	Meth	เมทแอมเฟตามีน (-) & กัญชา (-)
Con	THC	เมทแอมเฟตามีน (-) & กัญชา (+)

หมายเหตุ : ระดับความเข้มบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการ
แปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบสีที่ตรวจ แม้ว่าแถบสีจะชัดเจน
ก็สามารถอ่านผลเป็นผลลบได้

การแปลผล

ผลลบ

ปรากฏแถบสีควบคุมที่ตำแหน่ง “Con” และปรากฏแถบสีที่ตำแหน่งของการตรวจสอบสารเสพติดแต่ละชนิด
เมทแอมเฟตามีน (Meth) หรือกัญชา (THC) อ่านได้เป็นผลลบสำหรับสารเสพติดนั้นๆ
แปลว่ามีปริมาณสารเสพติดในปัสสาวะต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได้ (Cut-off) หรือไม่มีเลย

ผลบวก

ปรากฏแถบสีควบคุมที่ตำแหน่ง “Con” โดยไม่ปรากฏแถบสีที่ตำแหน่งของการตรวจสอบสารเสพติดแต่ละชนิด
เมทแอมเฟตามีน (Meth) หรือกัญชา (THC) อ่านได้เป็นผลบวกสำหรับสารเสพติดนั้นๆ
แปลว่ามีปริมาณสารเสพติดในปัสสาวะเท่ากับหรือสูงกว่าค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได้ (Cut-off)

แปลผลไม่ได้

ไม่ปรากฏแถบสีควบคุมที่ตำแหน่ง “Con” อาจเกิดจากปริมาณปัสสาวะที่ใช้น้อยกว่าที่กำหนด
หรือวิธีการทดสอบไม่ถูกต้อง แนะนำให้ทบทวนวิธีการทดสอบและทำการทดสอบซ้ำโดยใช้ชุดทดสอบอันใหม่
แต่หากยังคงปรากฏผลเช่นเดิม ให้หยุดใช้สินค้าล็อตดังกล่าวและติดต่อบริษัทผู้จำหน่ายสินค้า

ผลิตโดย: บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
42 หมู่ 4 ตำบลนาป่า อำเภอมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

จัดจำหน่ายโดย: บจก.ศุภโชค เคมีคอล ซัพพลาย
เลขที่ 909 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4000 โทร.043-001-141, 081-183-7766, 086-311-2730
<http://www.supachok.co.th> อีเมล info@supachok.co.th