


Feroza Meth-THC Duo Cassette


ชุดทดสอบหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน กัญชาและเมตาบอไลต์
ในปัสสาวะของมนุษย์แบบขั้นตอนเดียว

คุณลักษณะของชุดทดสอบ


- “ เป็นชุดตรวจหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนและกัญชาในปัสสาวะ ด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการการเกิดปฏิกิริยาการแย่งจับ (Competitive Binding Immunoassay) ”
- “ สามารถตรวจพบเมทแอมเฟตามีนได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 500 นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป และสามารถตรวจพบกัญชาได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป ”
- “ สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า ภายในเวลาเพียง 5 นาที ”
- * ภายใน 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้จำนวน 25 ตัวอย่าง *

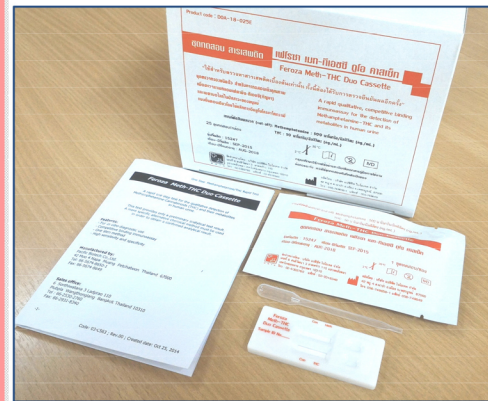


วิธีการทดสอบ

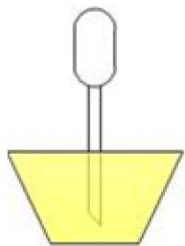

เก็บตัวอย่างปัสสาวะ

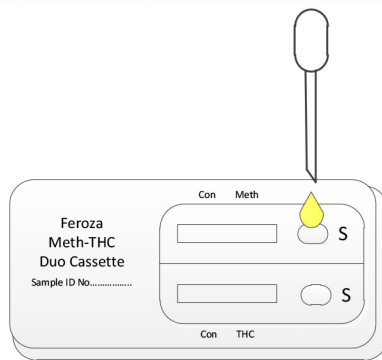

หยดตัวอย่างปัสสาวะลงในหลุม S หลุมละ 2 หยดทั้งซ้ายและขวา

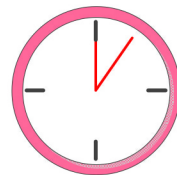

รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

การแปลผลทดสอบ

ผลลบ

ปรากฏแถบสีควบคุมที่ตำแหน่ง “Con” และปรากฏแถบสีที่ตำแหน่งของการตรวจหาสารเสพติดแต่ละชนิด เมทแอมเฟตามีน (Meth) หรือกัญชา (THC) อ่านได้เป็นผลลบสำหรับสารเสพติดชนิดนั้นๆ แปลว่ามีปริมาณสารเสพติดในปัสสาวะต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได้ (Cut-off) หรือไม่มีเลย

ผลบวก

ปรากฏแถบสีควบคุมที่ตำแหน่ง “Con” โดยไม่ปรากฏแถบสีที่ตำแหน่งของการตรวจหาสารเสพติดแต่ละชนิด เมทแอมเฟตามีน (Meth) หรือกัญชา (THC) อ่านได้เป็นผลบวกสำหรับสารเสพติดชนิดนั้นๆ แปลว่ามีปริมาณสารเสพติดในปัสสาวะเท่ากับหรือสูงกว่าค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได้ (Cut-off)

แปลผลไม่ได้

ไม่เกิดแถบสีควบคุมที่ตำแหน่ง “Con” อาจเกิดจากปริมาณปัสสาวะที่ใช้น้อยกว่าที่กำหนด หรือวิธีการทดสอบไม่ถูกต้อง แนะนำให้บทวนวิธีการทดสอบและทำการทดสอบซ้ำโดยใช้ชุดทดสอบอันใหม่ แต่หากยังคงปรากฏผลเช่นเดิม ให้หยุดใช้สินค้าล็อตดังกล่าวและติดต่อบริษัทผู้จำหน่ายสินค้า

ภาพแสดงการอ่านผลทดสอบ

Con	Meth		เมทแอมเฟตามีน (+) & กัญชา (-)
Con	THC		
Con	Meth		เมทแอมเฟตามีน (+) & กัญชา (+)
Con	THC		
Con	Meth		เมทแอมเฟตามีน (-) & กัญชา (-)
Con	THC		
Con	Meth		เมทแอมเฟตามีน (-) & กัญชา (+)
Con	THC		

หมายเหตุ : ระดับความเข้มบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบสีที่ตรวจ แม้ว่าแถบสีจะขีดจางก็สามารถอ่านเป็นผลลบได้

ผลิตโดย: บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
42 หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

จัดจำหน่ายโดย:

บจก.ศุภโชค เคมีคอล ซัพพลาย
เลขที่ 909 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4000 โทร.043-001-141, 081-183-7766, 086-311-2730
<http://www.supachok.co.th> อีเมล info@supachok.co.th